

婴儿安妮
050000
使用说明书



内容

保证声明.....	2
服务.....	2
介绍.....	3
拆包.....	3
包装.....	3
使用和维护介绍.....	4
组装.....	4
异物清除练习.....	4
隔离消毒.....	5

品质保证

LAERDAL 公司向客户保证，自用户购买之日起一年之内，其产品的材质和工艺不会有任何缺陷。LAERDAL 公司保证在此期间，一旦收到用户由于材质或工艺原因而损坏的产品和书面通知时，就会负责修理或更换损坏的部件或整个产品。损坏的产品和书面通知书也可送到

LAERDAL 公司委托的经销商处，所有的邮资、运费或搬运费将由客户承担。LAERDAL 公司只在以下条件下才对其产品的安全性、可靠性和使用性能负责：

- 由 LAERDAL 公司或 LAERDAL 公司委托代理商进行的产品售后服务、维修、调整或改装。
- 使用本产品时，一定要严格遵守“使用说明书”上的规定。

LAERDAL 公司不对以下情况负责：由非委托代理商进行过维修，改装或试图这样做而引起的偶然或间接的损坏；由于偶然事故，错误使用或滥用而造成的产品及任何部件的损坏。

本保证不包括电池、熔丝、正常磨损和破损，也不包括弄脏、褪色或其它不妨碍或降低产品性能的美观问题。

服务

模型人的所有部件都可以更换。如果某个部件发生断裂或磨损，您可以参照部件分解图和部件一览表(见后)进行辨别，并可以从 LAERDAL 公司或当地的 LAERDAL 经销商处购买到配件。

由于“婴儿安妮”的拆卸和组装极为简便，所以许多维修保养工作可以由用户自己完成。不过如果有任何问题，我们将很乐于帮助您。



介绍

婴儿安妮能为婴儿心肺复苏训练提供一个既实用又经济的模型。可使课堂上有更充足的模型供学生使用，增加学习的机会。婴儿安妮模拟一个三个月大的婴儿，有基本和仿真的生理结构，是训练基本生命支持，心肺复苏和清除气道异物哽塞的最佳组合。

一些有用的功能使婴儿安妮可进行有效的培训：

- 胸部按压感觉真实
- 气道系统既经济又易于保养
- 可以模拟异物哽塞和异物排除
- 仰头/抬下颌方可打开气道
- 面皮可拆除 / 再用，清洁容易

拆开包装

婴儿安妮模型包括：

- a. 模型
- b. 六个气道
- c. 手提包
- d. 使用说明
- e. 十个硬塞用异物

重新包装

不要在使用一次性气道时储存婴儿安妮，因为长时间关闭气道会导致永久性变形。


当收藏四个安妮时，请依图内显示摆放。



使用方法和维护

安装

注意：婴儿安妮并没有装上气道，使用前先把气道装上。

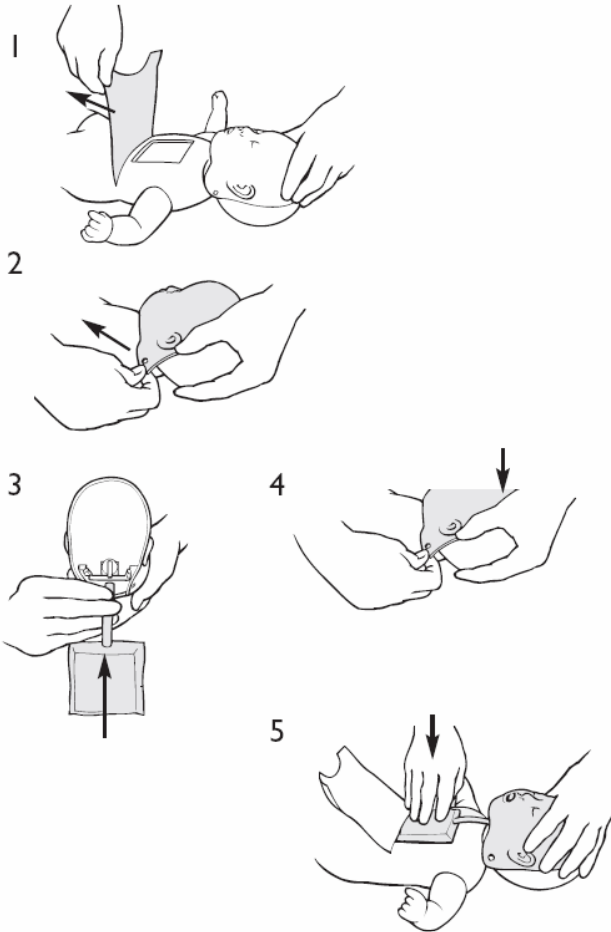

1. 打开胸盖
2. 把面皮除下
3. 将气道接上面部连接器
4. 把面皮和气道一并装回
5. 把肺袋放在胸前的凹位，确保气道没有屈曲和折合



练习清除异物哽塞

婴儿安妮可提供清除异物哽塞的急救程序。在肺袋施加足压力，便可把异物从面部接头喷出。因此拍背和压胸便可同时练习。

注意：必需保持气道畅通。

当完成拍背和压胸程序，检查异物是否已吐在口腔，用手指把异物拾起。如有效，便重复以上程序。



如何把异物放到模型内



- 把异物放进面部接头的空间
- 不要施加过大压力导致异物变形
- 此模型只可配挪度的异物来练习
- 使用后请把异物弃掉

隔离措施

在课程当中

我们推荐每个学生使用一个单独的模型，如果几个学生公用一个模型，每个学生应当有一套单独的面皮/气道。

任何一种情况下只有课后才能进行气道清理。每一个学生都应该学会面皮/气道的安装

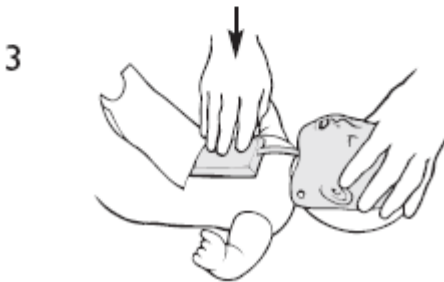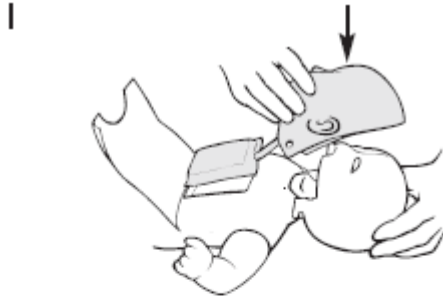

移除:

- 1、 打开胸皮
- 2、 把面皮从模型头部的两个固定扣上松开
- 3、 抬起面皮/气道装置

安装—见第四页

课后

课后使用过的面皮可以丢弃或者消毒清洁后重复使用

注意: 清洁的时候请带橡胶手套

1、 移除面皮/气道装置:

- a. 打开胸皮

- b. 把面皮从模型头部的两个固定扣上松开
- c. 抬起面皮/气道装置
- d. 从面皮的连接头上松开气道管路的连接, 丢弃气道, 保留其它部分
- e. 从面皮套装上移除下颌
- f. 从面皮上除下面皮连接器



2. 清洁消毒面皮和面部连接器

- a. 用温和的肥皂水清洁—用力擦洗清除内皮上的脏物
- b. 用清水冲去残留物
- c. 消毒模型面部: 用次氯酸钠溶液, 每班次使用一份, 是一种有效和值得推荐的消毒方式, 这种溶液至少要有 500ppm 的氯—1 份液体的家庭用漂白剂兑 100 份的自来水, 至少浸泡 10 分钟以充分消毒
- d. 用清水冲洗掉残留的消毒液

3. 让配件干燥



4. 重新组装婴儿安妮储存运输

- a. 把面部连接器连接到面皮上, 注意连接器的出气口朝下
- b. 把下颌连接到面皮上
- c. 重新安装面皮到模型头部, 注意要把下颌上的栓安装到头颅上面的槽里
- d. 敷上胸皮

普通模型清洁

不必要对整个模型消毒，但是推荐定期进行头部、身体、衣服还有携带箱的清洁。硬塑料部分应当用温和的肥皂水进行清洁，然后用干净的湿布冲洗拭去，纤维材质的身体部分只用湿布擦拭即可，如有需要，使用温和的清洁剂。

注意纤维材质的身体不要暴露在过分潮湿的环境中，因为可能浸透到模型的填料中。带有肋板的衣服应当手洗——或者用皂液或者洗衣液温水机洗，水温低于 40°C (100°F)，请注意吹干机可能导致永久性的缩水。

- 推荐使用乙烯手套，因为橡胶手套有可能污染面皮
- JAMA、美国心脏病协会和疾病控制中心（CDC）推荐